


INSTRUCCIONES CP100

DIAGRAMA

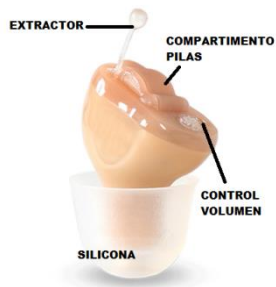

USO

- 1 Introducir en el aparato la cánula de silicona que mejor se adapte a su oído, es importante que la silicona quede ajustada para evitar pitidos de retroalimentación
- 2 Insertar la pila
- 3 Al cerrar el compartimento de la pila, el aparato se enciende.
- 4 Introducir en el oído, la posición correcta es cuando queda el control de volumen encima del compartimento de pilas.

INDICACIONES

Comience a probar con el volumen más bajo y súbalo gradualmente hasta que el sonido sea el adecuado a sus necesidades.

Si acerca la mano puede generar pitidos de interferencia.

Cuando no lo use, apáguelo abriendo el compartimento de la pila y así esta le durará más tiempo.

CONTROL DE VOLUMEN

Para controlar el volumen use la herramienta



PORTANTE

No usar en el agua (ducha, piscina etc.)

Si no lo usa por un período largo, quite la pila.

Mantener en un ambiente seco.

Se recomienda utilizar durante cortos períodos de tiempo, usar solo cuando necesite amplificar sonidos.

Depositar las pilas usadas en contenedores de pilas

